

Pobieranie próbek do badania skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych 3M™ ATTEST™

Do badania kontrolującego skuteczność procesu sterylizacji w sterylizatorach parowych stosuje się wskaźniki 3M™ ATTEST™.

1. Wskaźniki włożyć do środka reprezentatywnych pakietów i umieścić je w miejscu o najtrudniejszym dostępie pary.
2. Przeprowadzić proces sterylizacji.
3. Po zakończeniu cyklu należy wyjąć wskaźniki ze środka pakietów. Wskaźników nie należy ścisnąć aby nie uszkodzić szklanej ampułki z pożywką wewnątrz fiolki. Należy sprawdzić czy wskaźnik chemiczny na etykiecie zmienił zabarwienie z różowego na brązowy. Wskaźniki, które nie zmieniły barwy nie będą przyjmowane do badania.
4. W czasie nie dłuższym niż 24h, próbki (wskaźniki) należy dostarczyć do Laboratorium WSSE w temperaturze pokojowej.