



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
w TORUNIU**

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
tel. (056) 622 50 29, 622 33 12, 658 62 56; fax (056) 62 222 47
e-mail: psse.torun@pis.gov.pl www.torun.psse.gov.pl

1. Materiał : Krew lub surowica do badań serologicznych

a) sposób pobrania: wg procedur zleciodawcy z zachowaniem wszelkich reguł aseptyki

Uwagi:

- nie należy korzystać z żadnych środków przeciwwkrzepliwych lub środków konserwujących
- nie należy pobierać krwi bezpośrednio z cewnika i dojść założonych na stałe
- krew należy pobierać bezpośrednio z żyły łokciowej do sterylnej (jednorazowej) probówki w ilości około 5 ml od osoby dorosłej i około 3 ml od dziecka
- w przypadku surowicy, po odwirowaniu krwi, surowicę przelać do sterylnej (jednorazowej) probówki
- do probówki przymocować etykietę z oznaczeniem kierunku badania, imieniem i nazwiskiem (lub hasłem) oraz datę pobrania
- wypełnić czytelnie druk :”Zlecenie na badanie”, wg wzoru obowiązującego w Laboratorium PSSE w Toruniu z **pieczętką zleciodawcy i lekarza kierującego**
- dostarczyć lub przesłać do Laboratorium w szczelnie zamkniętej i zabezpieczonej przed wylaniem probówce (do czasu transportu przechowywać w chłodni w temp. 2-8° C)
- krew lub surowica powinna być klarowna: zhemolizowana bądź przerośnięta nie nadają się do badań serologicznych.

Krew nie powinna ulec zanieczyszczeniu bakteryjnemu zarówno podczas pobierania, jak i jej transportowania do miejsca, w którym zostanie wstępnie opracowana przed przesłaniem do pracowni serologicznej.



AB 583

Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu

ul. Kopernika 9; 87-100 Toruń
tel. (056) 653 93 76 do 78, fax (056) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl

**Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005**