

## **Sposób przeprowadzenia procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu ( Sporal A)**

1. Wskaźniki testowe włożyć do co najmniej dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
2. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji;
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 24 h.
4. Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji (tej samej serii, co badany test).
  - Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności.
  - Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowo-foliowego.