

Sporal A, Sporal S, Duo-spor

1. test biologiczny należy poddać sterylizacji, umieszczając w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego
2. przeprowadzić proces sterylizacji
3. po zakończeniu procesu sterylizacji, wyjąć wskaźniki testowe ze sterylizatora i włożyć oddzielnie do papierowych kopert
4. do każdej nowej serii testu biologicznego, należy dostarczyć jeden niewysterylizowany test, który jest kontrolą żywotności drobnoustrojów testowych w danej serii (nie przy każdym badaniu, tylko w momencie rozpoczęcia nowej serii testów biologicznych)
5. testy po zakończonym procesie sterylizacji powinny być dostarczone do badania w czasie nie dłuższym niż 24 godziny