

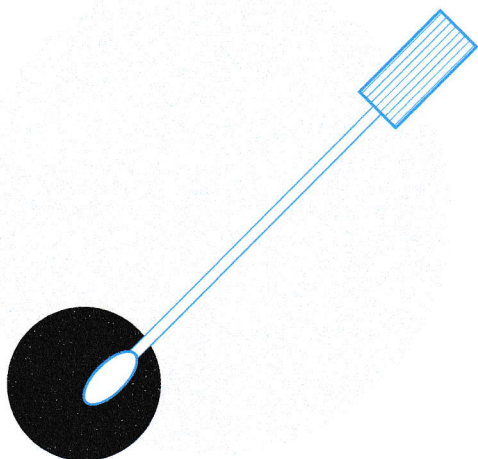


POBRANIE WYMAZU Z KAŁU

1 WYMAZÓWKĘ ZANURZAĆ W KILKU MIEJSCACH

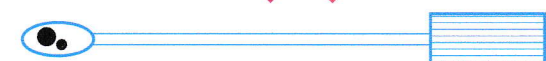


Wymaz znajduje się w nasączonym waciku.

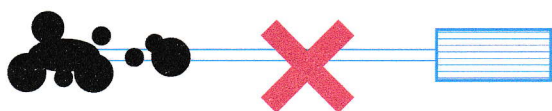

Wacik obficie obklejony materiałem.
Wacik nienasączony.

2 POBRANY WYMAZ WPROWADZIĆ DO PROBÓWKI

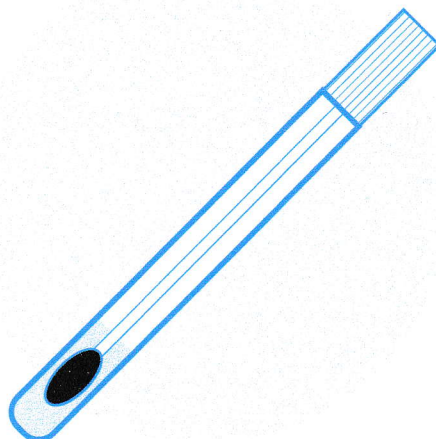

Wymaz znajduje się tylko w podłożu transportowym.



Wymaz znajduje się poza podłożem transportowym.



Dokładnie dociśnij korek, co automatycznie zabezpieczy próbkę w podłożu.

3 CZYTELNIE WYPEŁNIJ ETYKIETĘ

