

# Instrukcja obsługi

## Aplikacji PulsoCare Doctor

# Instalacja aplikacji na urządzeniach mobilnych


Aplikacja mobilna będzie dostępna do zainstalowania bezpośrednio ze sklepów z aplikacjami firmy Google (Google Play) oraz Apple (App Store).

Aplikacja dedykowana dla Lekarzy nazywa się PulsoCare Doctor.

## Logowanie do aplikacji

Aplikacja będzie wymagała jednorazowego zalogowania się przy pierwszym uruchomieniu.

Do zalogowania niezbędne będzie podanie loginu oraz hasła otrzymanego od Ministerstwa Zdrowia.

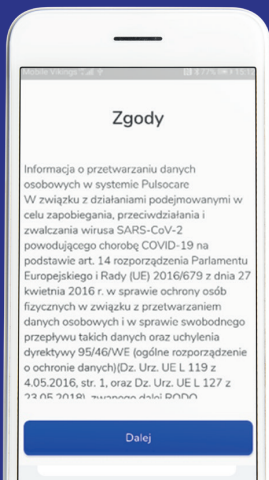

# Przeglądanie listy pacjentów

Pierwszym ekranem po zalogowaniu będzie lista Pacjentów, którzy zostali dodani do systemu przez zalogowanego Lekarza. Po pierwszym zalogowaniu ta lista będzie pusta i będzie możliwość dodania nowego Pacjenta do systemu.


Aplikacja prezentuje listę pacjentów dodanych do systemu przez zalogowanego lekarza.

Na liście znajdują się informacje:

- Imię i nazwisko Pacjenta
- PESEL
- Data wykonania ostatniego pomiaru



Istnieje także możliwość wyszukiwania konkretnego pacjenta poprzez PESEL lub imię i nazwisko.

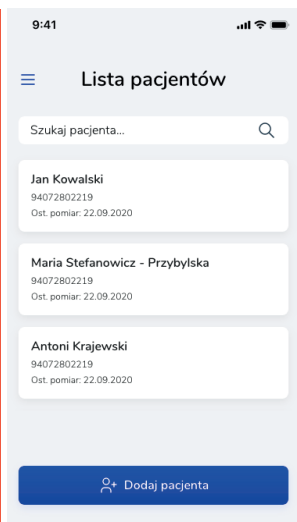

# Dodawanie nowego pacjenta

W celu dodania nowego Pacjenta do systemu należy kliknąć przycisk DODAJ PACJENTA na ekranie listy Pacjentów.

9:41 📶 🔋

< Dane pacjenta

Dane osobowe

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

PESEL

Dane kontaktowe ICE\*

Imię ICE

Nazwisko ICE

Numer ICE telefonu

Adres pobytu

W celu dodania Pacjenta należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk DODAJ PACJENTA.

Po zatwierdzeniu aplikacja wróci do ekranu prezentującego listę dodanych Pacjentów.