

### **Pobieranie kału do badań w kierunku pałeczek *Campylobacter***

- kał pobrać na podłoże transportowe z węglem aktywowanym typu Amies
- wymazówkę zanurzyć w kale do 3/4 wysokości bawełnianej watki, kilkakrotnie delikatnie obrócić, pobrać kał w ilości ok. 1g
- wymazówkę umieścić w podłożu transportowym, nie brudząc ścianek próbówki
- próbówkę opisać nazwiskiem, imieniem, datą i godziną pobrania
- próbkę dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania
- do momentu dostarczenia do laboratorium, próbkę należy przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C.