

Instrukcja użycia i transportu testów do kontroli sterylizacji.

1. Sposób postępowania:

- wskaźniki testowe (Attest 1262) włożyć do co najmniej dwóch pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
- przeprowadzić proces sterylizacji.
- po zakończeniu programu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe.

2. Transport:

- do momentu dostarczenia wskaźników do Laboratorium, przechowywać je w temperaturze 4-8 °C (w lodówce).
- czas dostarczenia testów, upływający od momentu zakończenia sterylizacji, nie może przekroczyć 24 h.