



Domowa
Opieka
Medyczna



Instrukcja dla użytkownika platformy DOM dotycząca programu Stetoskop

Spis treści

1	Logowanie	3
2	Dashboard	3
3	Lista pacjentów.....	5
4	Program Stetoskop.....	5
4.1	Rozpoczęcie programu Stetoskop u pacjenta	5
4.2	Zbieranie pomiarów - Pacjent	7
4.3	Wyniki pomiarów	7
4.4	Zakończenie programu	10
4.5	Dodanie nowego pacjenta z programem Stetoskop	12

1 Logowanie

W celu zalogowania się do systemu należy przejść na stronę <https://dom.mz.gov.pl/>



Witaj

Zapamiętaj mnie

Zaloguj się

[Instrukcja użytkownika dla lekarza POZ](#)

[Instrukcja użytkownika dla pacjenta](#)

Na tej stronie należy wprowadzić login i hasło. Login powinni Państwo otrzymać przez system SZOI lub portal świadczeniodawcy. Hasło do systemu jest generowane na podstawie numeru PESEL oraz imienia lekarza. Dla przykładu:

PESEL: 5 0 1 0 0 6 1 4 5 9 5

Imię: Krzysztof

Hasło: 00649k


Hasło składa się z 2, 4, 6, 8, i 10 cyfry numeru PESEL oraz z małej pierwszej litery imienia lekarza.

2 Dashboard

Po zalogowaniu pojawi się dashboard. Znajdują się tutaj 3 sekcje:


- Twoi pacjenci z podziałem na program,
- Dzisiejsze teleporady,
- Dzisiejsze alerty.

W sekcji Twoi pacjenci znajdują się informacje o liczbie aktywnych pacjentów w każdym z programów:

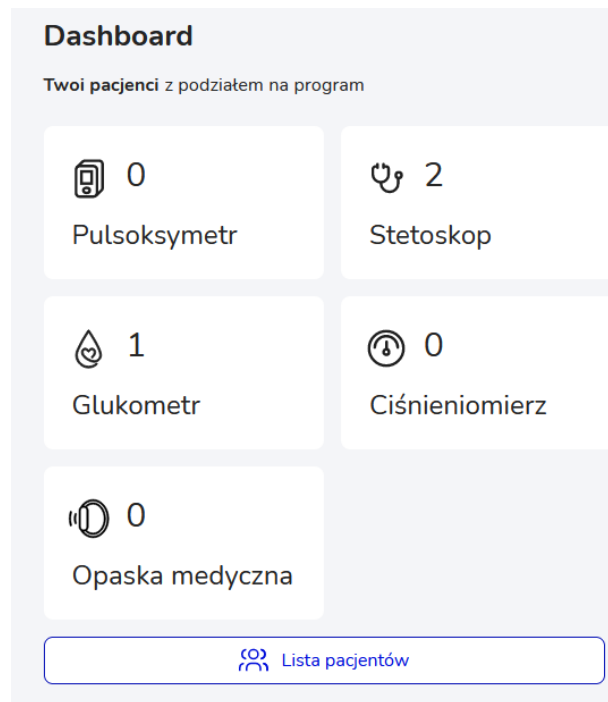

Wybierając dowolny „kafelek” nastąpi przeniesienie do widoku z listą pacjentów z włączonym filtrem na wybrany program.

Aby przejść do listy wszystkich pacjentów należy wybrać przycisk *Lista pacjentów* na Dashboardzie lub w menu bocznym.

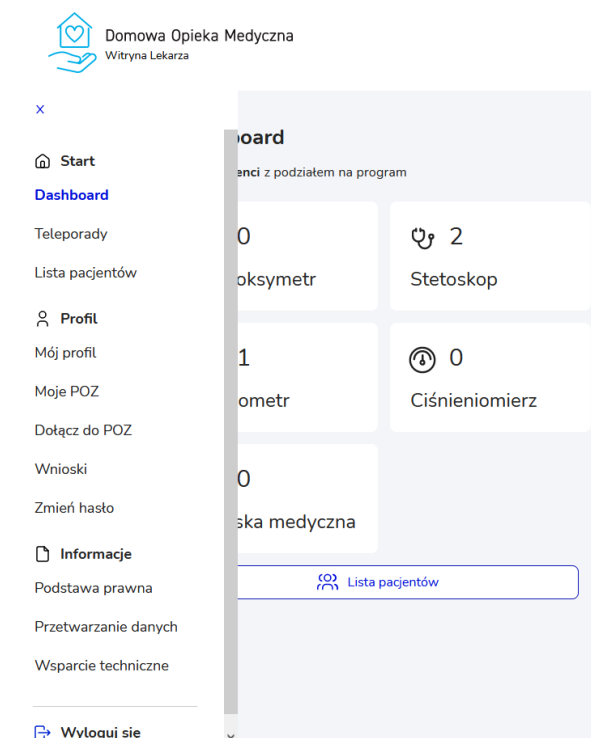

3 Lista pacjentów

Na widoku listy pacjentów znajdują się podstawowe dane pacjenta, urządzenia pomiarowe, z którego korzysta w ramach programu DOM oraz kilka innych informacji. Lista ta może być filtrowana po POZ, z którymi zalogowany lekarz współpracuje oraz po typie urządzenia pomiarowego jakim posługuje się pacjent.

Dodatkowo, można również pokazać wszystkich pacjentów z danego POZ, również przypisanych do pozostałych lekarzy, którzy współpracują z wybranym POZ. Zalogowany lekarz może przeglądać pacjentów przypisanych do innych lekarzy w obrębie tego samego POZ.

Przy użyciu pola Szukaj można również wyszukać dowolnego pacjenta na liście. Można tego dokonać wpisując fragment nazwiska, imienia, numeru pesel lub nr telefonu.

Program „Stetoskop” oznaczony jest w tabeli w kolumnie „Urządzenia” ikoną przedstawioną poniżej:




Aby wyświetlić na liście pacjentów, którzy są przypisani do programu „Stetoskop” należy w polu filtracji „Wybierz urządzenie pomiarowe” wybrać pozycję „Stetoskop”.

4 Program Stetoskop


4.1 Rozpoczęcie programu Stetoskop u pacjenta

W celu rozpoczęcia programu „Stetoskop” u danego pacjenta należy:


1. Wyszukać go na liście pacjentów i przejść w jego szczegóły wybierając odpowiedni wiersz w tabeli (lub dodać nowego pacjenta i uruchomić mu program – opisane w rozdziale 4.5);
2. W szczegółach pacjenta należy przejść do zakładki „Ustawienia” i wybrać przycisk *Rozpocznij* przy wierszu „Stetoskop”

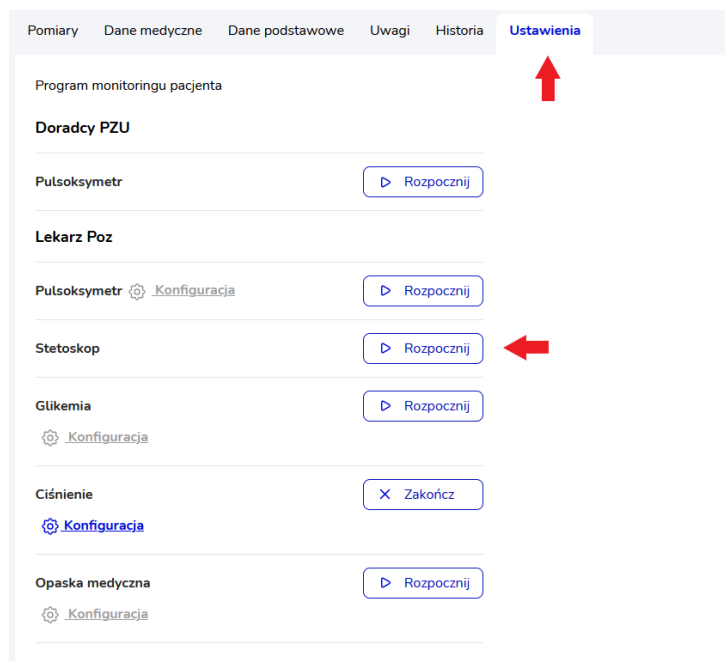

3. Po wybraniu przycisku *Rozpocznij* zostaje wyświetlone okno modalne z zatwierdzeniem wyboru. Jeżeli chcemy rozpocząć program „Stetoskop” u pacjenta należy wybrać przycisk *Tak, chcę*. Jeżeli chcemy zrezygnować z uruchomienia programu należy wybrać przycisk *Nie, nie chcę* (okno zostanie zamknięte, program nie zostanie rozpoczęty).

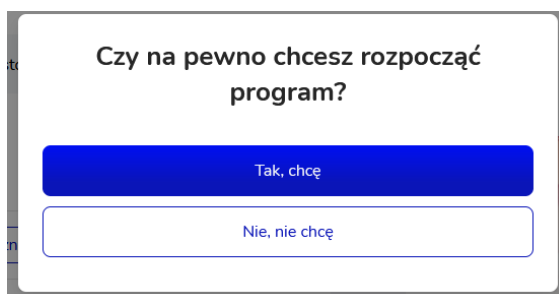


4. Jeżeli zostanie wybrana opcja „Tak, chcę” zostanie wyświetlone potwierdzenie rozpoczęcia programu.

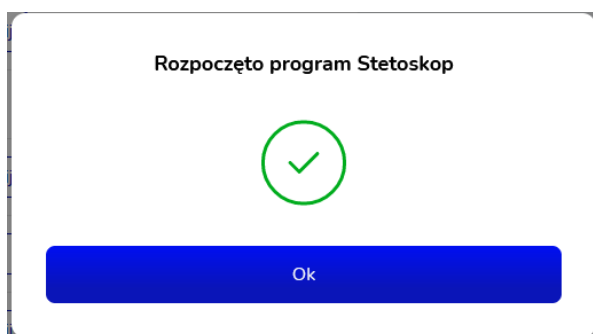


4.2 Zbieranie pomiarów - Pacjent

Aby wykonać badanie Pacjent musi posiadać zainstalowaną aplikację DOM na swoim telefonie. Chcąc wykonać pomiar musi wybrać przycisk *Start* w aplikacji w programie „Stetoskop” aby połączyć się ze stetoskopem i następnie wykonać pomiary zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

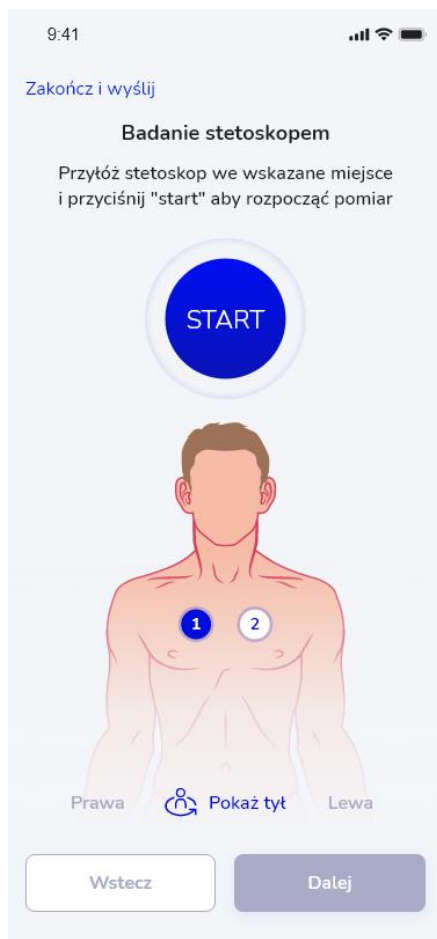


4.3 Wyniki pomiarów

Wykonane przez stetoskop wyniki pomiarów lekarz może przeglądać w szczegółach pacjenta w zakładce „Pomiary”. Znajdują się tutaj wyniki z wszystkich programów, w których uczestniczy pacjent, dlatego w polu „Wybierz program” należy wybrać pozycję „Stetoskop”, aby wyświetlić wyniki dla programu „Stetoskop”.

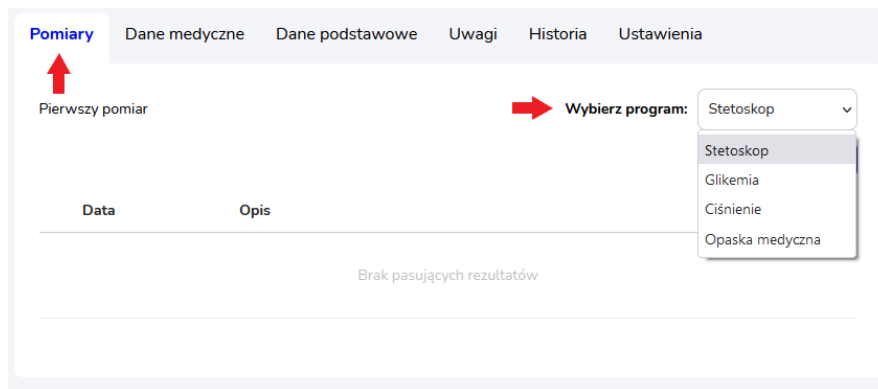

W wyświetlonej tabeli pomiarów znajduje się:

- oznaczenie oceny badania,
- informacja o dacie i godzinie pomiaru,
- opis pomiaru (jeżeli został dodany przez lekarza w przypadku pomiaru prawidłowego)

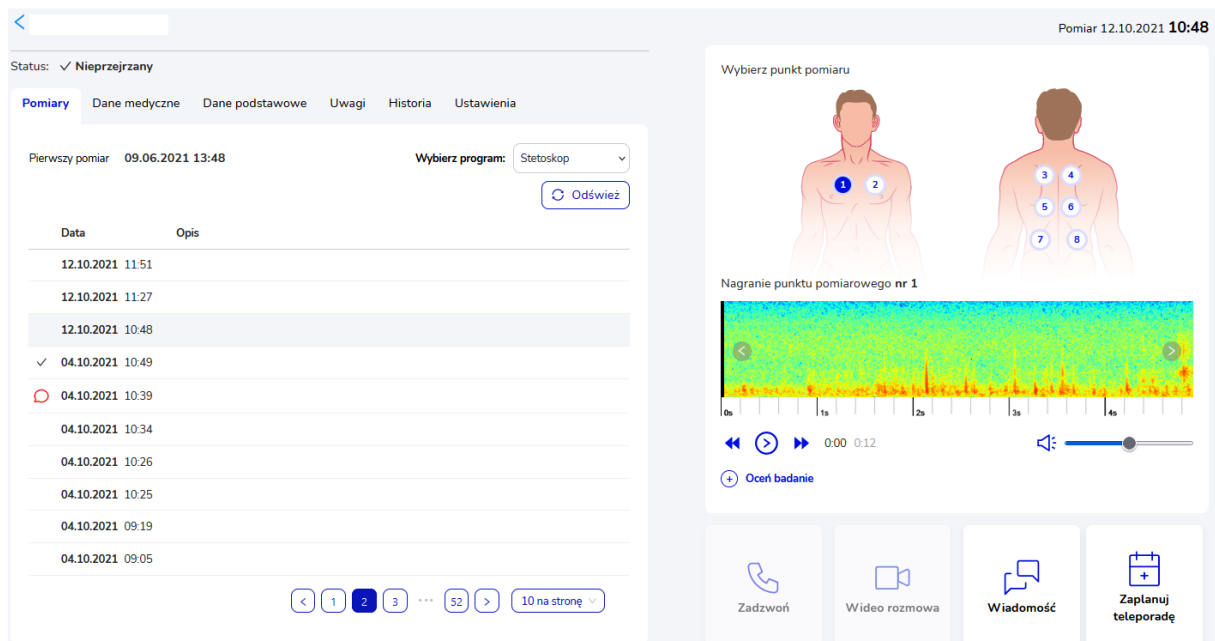

Nad tabelą znajduje się informacja o dacie i godzinie pierwszego pomiaru, a także przycisk odświeżenia wyników pomiarów *Odśwież*.

Po wybraniu w tabeli dowolnego pomiaru, z lewej strony ekranu wyświetlone zostają jego szczegóły. Znajdują się tutaj nagrania z poszczególnych punktów pomiarowych z możliwością zmiany głośności oraz wprowadzenia oceny badania. Wybierając przycisk *Oceń badanie* zostanie wyświetlone okno z wyborem:

Czy badanie jest prawidłowe?

Prawidłowe

Niska jakość badania

Badanie nadmierowe

Nieprawidłowe - inny powód

Zapisz

Anuluj

Należy wybrać odpowiednią ocenę badania. W przypadku wybrania opcji „Nieprawidłowe – inny powód” należy wprowadzić w wyświetlonym polu powód nieprawidłowości:

Czy badanie jest prawidłowe?

Prawidłowe

Niska jakość badania

Badanie nadmierowe

Nieprawidłowe - inny powód


Powód

Wpisz powód

Zapisz


Anuluj

W przypadku wybrania opcji „Prawidłowe” w szczegółach pojawi się pole do wprowadzenia uwag dotyczących badania. Uwagi te można później edytować.

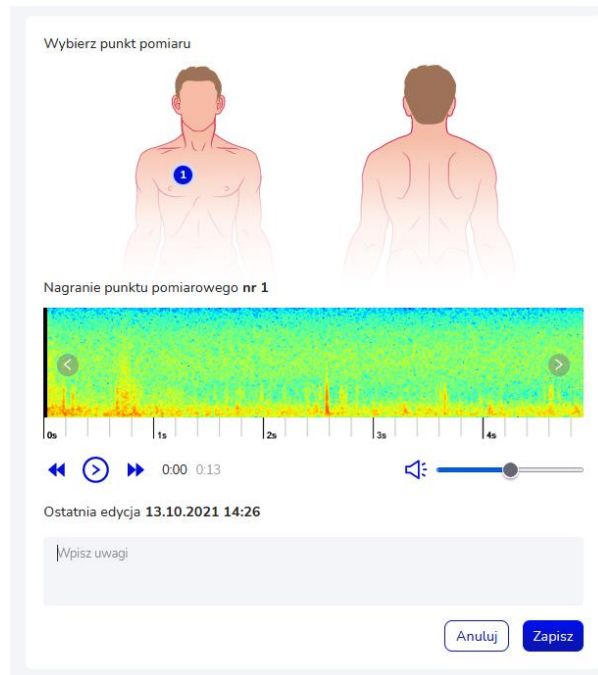

4.4 Zakończenie programu

W celu zakończenia programu „Stetoskop” u pacjenta należy wybrać w jego szczegółach w zakładce „Ustawienia” przycisk *Zakończ* przy danym programie.

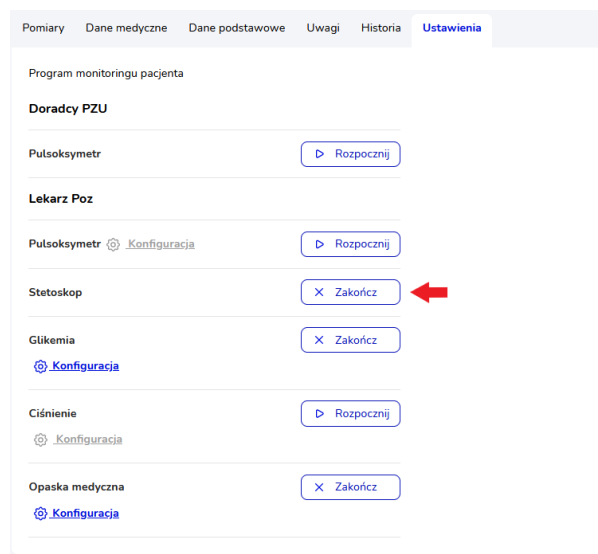

Po wybraniu przycisku zostanie wyświetlona obowiązkowa do uzupełnienia ankieta. Przechodzenie na kolejne strony ankiety odbywa się za pomocą przycisku *Dalej*. W każdej chwili można zrezygnować z wypełniania ankiety i zakończenia programu „Stetoskop” wybierając przycisk *Anuluj* na pierwszej stronie ankiety. Po wypełnieniu ankiety należy wybrać przycisk *Wyślij wyniki*.

Ankieta satysfakcji

Ankieta dot. oceny jakości przeprowadzonego badania i funkcjonalności elektronicznych stetoskopów dla diagnostyki świadczeniobiorcy w ramach teleporady 1/4

Czy wystąpiły problemy z przeprowadzeniem badania stetoskopem elektronicznym?

Tak

Nie

Jeśli wystąpiły trudności, co było ich przyczyną? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Wytłumaczenie pacjentowi działania urządzenia

Problem z prawidłowym wykonaniem badania przez pacjenta

Problem z jakością zapisu

Problem z interpretacją zapisu osłuchiwania

Inne

Jakie:

Czy konieczne było powtórzenie badania, ze względu na nieprawidłowe użycie stetoskopu elektronicznego przez Pacjenta?

Tak

Nie

Czy odstęp badania wpłynął istotnie na proces stawiania diagnozy?

Tak

Nie

Jeśli nie, to dlaczego

Po zatwierdzeniu ankiety wyświetlone zostaje okno z obowiązkowym do uzupełnienia uzasadnieniem. Po wprowadzeniu uzasadnienia należy zatwierdzić przyciskem *Tak, chcę*, aby zakończyć program. Jeżeli chcemy zrezygnować z zakończenia programu należy wybrać przycisk *Nie, nie chcę* (okno zostaje zamknięte, program nie zostaje zakończony).

Po posłaniu

Czy na pewno chcesz zakończyć program?

Uzasadnienie

Wpisz dodatkowe uwagi dotyczące decyzji

Do pacjenta zostaje wysłany komunikat z informacją o zakończeniu programu wraz z linkiem do wypełnienia ankiety. Ankieta Pacjenta dostępna jest wyłącznie pod wysłanym linkiem. Lekarz na widoku ustawień widzi informację, czy pacjent uzupełnił ankietę czy jeszcze nie.

Pomiary Dane medyczne Dane podstawowe Uwagi Historia **Ustawienia**

Program monitoringu pacjenta

Doradcy PZU

Pulsoksymetr

Lekarz Poz

Pulsoksymetr [Konfiguracja](#)

Stetoskop

Data zakończenia: 13.10.2021

Ankieta: Niewypełniona

Glikemia [Konfiguracja](#)

Ciśnienie [Konfiguracja](#)

Opaska medyczna [Konfiguracja](#)

4.5 Dodanie nowego pacjenta z programem Stetoskop

Aby dodać nowego pacjenta do systemu z uruchomionym od razu programem „Stetoskop” należy przejść do widoku Lista pacjentów i wybrać przycisk *Dodaj pacjenta*.

Lista pacjentów

Pokaż wszystkich z POZ

Wybierz POZ:
 Wybierz urządzenie pomiarowe:

Alert	Status	Urząd.	Nazwisko	Imię	PESEL	Nr telefonu	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	Data rozpoznania COVID-19	Ostatni pomiar
											06.10.2021
											Brak pomiarów
											10.09.2021

←

Zostanie wtedy wyświetlone okno modalne z obowiązkowymi do uzupełnienia polami dotyczącymi danych pacjenta. Pole „Wybierz lekarza POZ” jest zablokowane do uzupełnienia przez lekarza (pacjent zostaje automatycznie przypisany do lekarza, który go dodaje). Dane osoby kontaktowej są polami nieobowiązkowymi, ale zalecanymi do uzupełnienia. Po uzupełnieniu formularza należy wybrać przycisk *Dalej*. Wybranie przycisku *Anuluj* spowoduje wycofanie się z operacji dodawania pacjenta, dane nie zostaną zapisane.

Dodaj pacjenta

Dane podstawowe

Wybierz POZ

Wybierz lekarza POZ

Dane osobowe

Imię

Nazwisko

PESEL

Numer telefonu

Dane osoby kontaktowej

Imię osoby kontaktowej

Nazwisko osoby kontaktowej

Na wyświetlonym widoku wyboru programu domyślnie wybrany jest program „Pulsoksymetr”, aby uruchomić program „Stetoskop” należy zaznaczyć go na liście i zatwierdzić przyciskiem *Zapisz*. Wybranie przycisku *Wstecz* spowoduje powrót do widoku uzupełniania formularza danych pacjenta.

Wybierz program do którego chcesz dodać pacjenta

Możesz zmienić ten wybór później w ustawieniach

Monitorowane przez:

Doradcy PZU

Pulsoksymetr

Czy pacjent posiada własny pulsoksymetr? Tak Nie

Data rozpoznania COVID-19

dd.mm.rrrr

Lekarz POZ

Pulsoksymetr

Glikemia

Ciśnienie

Stetoskop

Opaska medyczna

Dodanie pacjenta do większej liczby programów jest możliwe po rejestracji pacjenta z poziomem jego profilu, zakładka Ustawienia.

[Wstecz](#) [Zapisz](#)



Wybierz program do którego chcesz dodać pacjenta

Możesz zmienić ten wybór później w ustawieniach

Monitorowane przez:

Doradcy PZU

Pulsoksymetr

Lekarz POZ

Pulsoksymetr

Glikemia

Ciśnienie

Stetoskop

Opaska medyczna

Dodanie pacjenta do większej liczby programów jest możliwe po rejestracji pacjenta z poziomem jego profilu, zakładka Ustawienia.

[Wstecz](#) [Zapisz](#)

Po zatwierdzeniu pacjent zostaje dodany z uruchomionym programem „Stetoskop”.

Dodanie nowego Pacjenta skutkuje wysłaniem mu powitalnej wiadomości SMS zawierającej niezbędne informacje wraz z hasłem.

Dane podstawowe pacjenta można później (po dodaniu użytkownika) edytować w jego szczegółach w zakładce „Dane podstawowe”. Istnieje tam również możliwość wysłania ponownie kodu SMS do pacjenta, jeśli nie otrzymał go po założeniu konta.

Pomiary Dane medyczne **Dane podstawowe** Uwagi Historia Ustawienia

PESEL

Numer telefonu Adres pobytu Czy pacjent przebywa samotnie?
TAK

Imię i nazwisko osoby kontaktowej Numer telefonu osoby kontaktowej Godzina rozpoczęcia dziennej aktywności
07:00

Godzina zakończenia dziennej aktywności
22:00

Kod SMS
[Wydlij kod ponownie](#)