

Instrukcja pobierania, przechowywania i transportu próbek z biologicznymi wskaźnikami kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu

Kontrola skuteczności procesu sterylizacji

Warunki ogólne przyjmowania próbki do badań:

Przyjmowanie do badania wskaźników sterylizacji (sporal A) w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie odbywa się w wyznaczone dni.

Harmonogram jest aktualizowany na bieżąco w danym miesiącu.

- Sporal A: całkowity koszt badania jednego autoklawu dotyczy 3 wskaźników,
- opłatę należy uiścić przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie

Bank: NBP/Szczecin Konto: **60 1010 1599 0519 8522 3100 0000**

- w tytule przelewu należy podać:
 - w przypadku działalności gospodarczej: w dniu dokonania wpłaty za usługę (badanie) należy podać sprzedawcy swój numer identyfikacyjny NIP
 - fakt, ten można zgłosić drogą mailową na adres: gk.psse.gryfino@sanepid.gov.pl lub wpisać w tytule przelewu.
 - w przypadku braku numeru NIP faktura nie będzie mogła być wystawiona na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
- obowiązuje przedpłata na konto Stacji
- dowód wpłaty należy okazać przy składaniu zlecenia.

Technika przeprowadzenia kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu:

- Próbkę stanowi biologiczny wskaźnik w formie bibuły nasyconej zawiesiną spor szczepu *Geobacillus stearothermophilus*, który służy do przeprowadzenia kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (autoklaw).
- Czynnikiem sterylizującym w sterylizacji parowej jest nasycona parą wodną w nadciśnieniu w temp. 121°C (nadciśnienie -1atm) lub w temp. 134°C (nadciśnienie - 2 atm).
- Parametry sterylizacji (temperatura, ciśnienie pary wodnej i czas) zależą od zastosowanej technologii sterylizacji parowej oraz od sterylizowanego materiału.
- Wskaźniki testowe umieścić wewnątrz komory sterylizatora w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego.
- Oprócz testów użytych do kontroli urządzenia sterylizacyjnego należy dostarczyć również jeden test tzw. wskaźnik kontrolny nie poddany sterylizacji celem wykonania posiewu kontrolnego.

- Wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji musi być tej samej serii, co badany test.
- Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności.
- Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki testowe wyjąć ze sterylizatora i umieścić w papierowej kopercie (upewnić się czy wskaźnik chemiczny wydrukowany na etykiecie zmienił kolor).
- Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowo-foliowego.

Przechowywanie i transport

- Przechowywanie wskaźnika przed procesem sterylizacji: temperatura pokojowa, z dala od źródeł ciepła, chronić przed zawilgoceniem.
- Wskaźniki testowe powinny być dostarczone do PSSE w Gryfinie jak najszybciej w czasie nie dłuższym niż 17 godziny (rozpoczęcie procesu sterylizacji nie wcześniej niż o godzinie 17.00 w dniu poprzedzającym dostarczenie wskaźników do badania).
- Wskaźnik umieścić w kopercie, nieuszkodzonej, oznakowanej nazwą instytucji zlecającej.
- Do próbki musi być dołączone „Skierowanie na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji”.

Ważne:

- Druki: „Skierowania na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji” oraz „Zlecenia na badanie skuteczności procesu sterylizacji” można pobrać ze strony internetowej PSSE w Gryfinie lub w siedzibie PSSE.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 91 416 23 43 (fax); 91 416 38 58

Odbiór wyników:

Wyniki należy odebrać osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną w sekretariacie PSSE Gryfino w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku.

