

Instrukcja obsługi

Aplikacji DOM – Domowa Opieka Medyczna Doctor w ramach programu PulsoCare

Instalacja aplikacji na urządzeniach mobilnych



Aplikacja mobilna jest dostępna do zainstalowania bezpośrednio ze sklepów z aplikacjami firmy Google (Google Play) oraz Apple (App Store).

Aplikacja dedykowana dla lekarzy nazywa się **Domowa Opieka Medyczna Doctor**

Logowanie do aplikacji

Aplikacja będzie wymagała jednorazowego zalogowania się przy pierwszym uruchomieniu.

Do zalogowania niezbędne będzie podanie loginu oraz hasła otrzymanego od Ministerstwa Zdrowia.

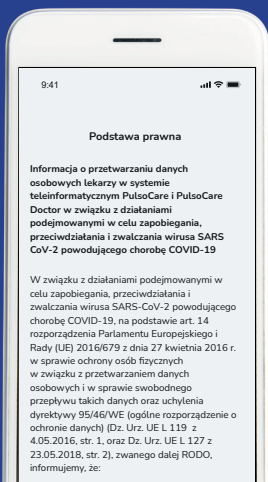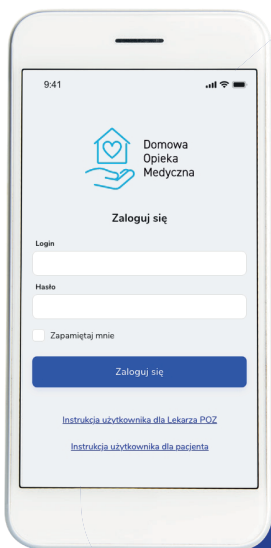

Przeglądanie listy pacjentów

Pierwszym ekranem po zalogowaniu będzie lista pacjentów, którzy zostali dodani do systemu przez zalogowanego lekarza. Po pierwszym zalogowaniu ta lista będzie pusta i będzie możliwość dodania nowego pacjenta do systemu.

Aplikacja prezentuje listę pacjentów dodanych do systemu przez zalogowanego lekarza.

Na liście znajdują się informacje:

- Imię i nazwisko pacjenta
- PESEL
- Data wykonania ostatniego pomiaru



Istnieje także możliwość wyszukiwania konkretnego pacjenta poprzez PESEL lub imię i nazwisko.

9:41 📶 🔋

☰ 🔍

Lista pacjentów

Szukaj pacjenta

Wpisz imię/nazwisko/telefon/PESEL 🔍

Wybierz POZ

POZ nr 1 we Wrocławiu ▾

Jan Kowalski 📄 ⚠️ 🚗

94072802219

Ost. pomiar: 22.09.2020, 12:30

Data diagnozy COVID: 22.09.2020

Anna Nowak 📄 ⚠️ 🚗

94072802219

Ost. pomiar: 22.09.2020, 12:30

Data diagnozy COVID: 22.09.2020

Karolina Adamowska 📄

94072802219

Ost. pomiar: 22.09.2020, 12:30

Data diagnozy COVID: 22.09.2020

👤+ Dodaj pacjenta

Dodawanie nowego pacjenta

W celu dodania nowego pacjenta do systemu należy kliknąć przycisk **DODAJ PACJENTA** na ekranie listy pacjentów.

9:41 📶 🔋

Anuluj

Dodaj pacjenta
Dane podstawowe

Dane osobowe

Imię

Nazwisko

PESEL

Numer telefonu

Dane osoby kontaktowej

Imię osoby kontaktowej

Nazwisko osoby kontaktowej

Numer telefonu osoby kontaktowej

Anuluj Dalej

W celu dodania pacjenta należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk **DODAJ PACJENTA**.

Po zatwierdzeniu aplikacja wróci do ekranu prezentującego listę dodanych pacjentów.

Dlaczego należy zachęcać pacjentów do korzystania

Aplikacja Domowa Opieka Medyczna na podstawie regularnych pomiarów wykonywanych przez pacjenta, monitoruje jego stan zdrowia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem dedykowanej dyspozytorni medycznej. Obecnie stosowane w leczeniu szpitalnym leki (Remdesivir, osocze ozdrowieńców, glikokortykosteroidy i inne) są skuteczne wyłącznie określonym oknie terapeutycznym (wg. Farmakoterapia COVID-19, AOTMiT).

Program PulsoCare daje szansę wychwycić pacjenta na wczesnym etapie pogorszenia, gdy dostępna farmakoterapia jest najskuteczniejsza!

Po wszczęciu alarmu koordynator PZU skontaktuje się z pacjentem, weryfikując rzetelność pomiarów i zasadność alarmu. W przypadku potwierdzenia jego zasadności skieruje pacjenta na teleporadę u lekarza dyżurnego PZU Zdrowie, a w skrajnych przypadkach zaleci wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Program PulsoCare może znamienne pomóc pacjentom, ograniczając śmiertelność – jednak wyłącznie tym, którzy będą się regularnie monitorować, dlatego podczas każdej teleporady udzielanej pacjentowi COVID-19 zachęcaj go do regularnego monitoringu zgodnego z zaleceniami systemu.

Należy sprawdzić, czy pacjent po otrzymaniu pulsoksymetru robi regularne pomiary i wysyła je do systemu

9:41

< Cofnij

Jan Kowalski

Zlecono teleporadę

Zadzwoń Wideo Wiadomość Zaplanuj teleporadę

Wysoka pulmonologiczna

Dane pacjenta **Pomiary** Ustawienia

Wybierz program

Pulsoksymetr

Rodzaj podglądu:

23.10.2020 12:30			
Saturacja	Tętno	Temperatura	Cz. oddechów
90 %	70 BPM	38.2 °C	36 / min

23.10.2020 12:30			
Saturacja	Tętno	Temperatura	Cz. oddechów
90 %	70 BPM	38.2 °C	36 / min

23.10.2020 12:30			
Saturacja	Tętno	Temperatura	Cz. oddechów
90 %	70 BPM	38.2 °C	36 / min

23.10.2020 12:30			
Saturacja	Tętno	Temperatura	Cz. oddechów
90 %	70 BPM	38.2 °C	36 / min

Jeżeli w systemie wyniki badań pacjenta nie są widoczne, można się z nim skontaktować telefonicznie.

9:41

< Cofnij

Jan Kowalski

Zlecono teleporadę

Zadzwoń Wideo Wiadomość Zaplanuj teleporadę

Wysoka pulmonologiczna

Dane pacjenta Pomiary Ustawienia

Dane podstawowe

PESEL	Imię kontaktowej
94072802239	Janina
Wiek	Nazwisko osoby kontaktowej
36	Kowalska
Płeć	Numer telefonu osoby kont.
Mężczyzna	520846123
Numer telefonu	Czy przebywa samotnie?
605561234	TAK
Adres pobytu	Data rozpoznania COVID
Wysockiego 43/5	24.10.2020

Wsparcie dla lekarzy POZ w związku z programem aktywizacji pacjentów:
wsparciepoz@holo4med.com



dom.mz.gov.pl