

Instrukcja:

## **INSTRUKCJA UŻYCIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU SPORALI A I S**

1. Opakowanie ze sporalem A lub S umieścić wśród pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Podczas sterylizacji nie wyjmować testu z opakowania papierowo-foliowego (sporal A) oraz nie zdejmować białej bibuły zabezpieczającej (sporal S).
2. Przeprowadzić sterylizację według instrukcji producenta autoklawu lub sterylizatora.
3. Sporale dostarczyć do badania w ciągu 24h od zakończenia sterylizacji, do tego czasu przechowywać w temp. pokojowej w suchym miejscu.
4. Wskaźniki zniszczone, uszkodzone mechanicznie, ze spalonymi bibułkami zabezpieczającymi nie będą przyjmowane.
5. Jeśli testy nie zostały pobrane w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii w Lesznie, należy dla danej serii produktu dostarczyć do badania wskaźnik kontrolny (który nie przeszedł cyklu sterylizacji) .
6. Podczas transportu należy przestrzegać w/w warunków przechowywania oraz zapewnić bezpieczeństwo przed uszkodzeniem mechanicznym próbek.
7. Testy uszkodzone, przeterminowane oraz otwarte należy wysterylizować lub spalić.