

Badania wskaźników biologicznych na skuteczność procesu sterylizacji
(Sporale A, Sporale S, Attesty)

Sposób pobrania materiału do badań:

Wskaźniki testowe umieścić (najlepiej wewnątrz pakietu) w 2 – 3 miejscach komory sterylizatora, przeprowadzić ustalony program sterylizacji.

Wskaźniki testowe należy używać w terminie ważności podanym przez producenta.

Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny o tym samym Nr serii co badany test (nie poddany procesowi sterylizacji).

Należy uważać, aby próbki nie uległy zniszczeniu, zabrudzeniu lub zawilgoceniu.

Próbki do badań należy dostarczyć do Laboratorium w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zakończenia procesu sterylizacji.

Do każdego wskaźnika (testu) musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie badania.