

### Wyciąg z Instrukcji:

**„Instrukcja pobierania i transportowania materiału do badań mikrobiologicznych wykonywanych w Laboratoriach Badań Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu”  
wydanie 8 z dn. 27.09.2021 r.**

### **Punkt 13**

**Postępowanie z testem biologicznym do kontroli procesów sterylizacji (dla użytkowników urządzenia sterylizującego).**

1. Umieścić test biologiczny w najtrudniej dostępnym miejscu załadunku sterylizatora (zaleca się stosowanie co najmniej dwóch testów dla danego załadunku).
2. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji z zachowaniem parametrów technicznych procesu sterylizacji.
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć testy biologiczne niezwłocznie po ostudzeniu i przewietrzeniu załadunku.
4. Dostarczyć testy do laboratorium w czasie 2 godzin po ekspozycji. Gdy jest to niemożliwe przechować je w temperaturze pokojowej do 24 godzin.

Zaakceptował:

Zastępca Głównego Specjalisty  
ds. Systemu Jakości  
w zakresie laboratorium

*Ewa Brykalska*

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
Działu Laboratoryjnego

*mgr Urszula Leniak-Chmiel*