

Instrukcja obsługi

Aplikacji DOM - Domowa Opieka Medyczna

Instalacja aplikacji na urządzeniach mobilnych

Aplikację możesz zainstalować ze sklepów Google (Google Play) i Apple (App Store).

Każdy pacjent, którego lekarz zgłosi do systemu, dostanie SMS z linkiem do odpowiedniego sklepu z aplikacjami i unikalnym kodem, którym zaloguje się do aplikacji.


Logowanie do aplikacji

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zaloguj się do niej.

Przy pierwszym logowaniu podaj:

- numer telefonu przekazany lekarzowi
- kod z SMS-a

Następnie zaakceptuj zgody na przetwarzanie danych osobowych.

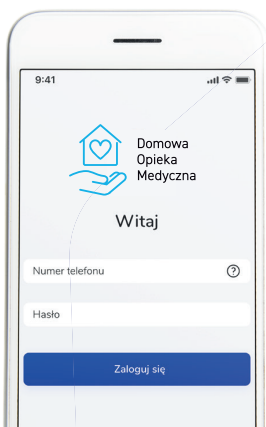

Podłączenie urządzenia

Glikemia

Ciśnienie

W przypadku tych programów, nie jest konieczne podłączenie urządzenia. Po przeprowadzeniu pomiaru wyniki z urządzenia należy wpisać w aplikacji.

Pulsoksymetr

Stetoskop

Aplikacja łączy się z pulsoksymetrem oraz stetoskopem przez Bluetooth. Zanim rozpoczniesz pomiar, połącz telefon z urządzeniem.

Aplikacja pokaże, co zrobić, aby połączyć telefon z urządzeniem.

Przejdź do ustawień Bluetooth w swoim telefonie i tam dodaj nowe urządzenie.

Procedura łączenia telefonu z urządzeniami zewnętrznymi przez Bluetooth może być inna dla każdego telefonu.


1. Przejdź do ustawień Bluetooth
2. Uruchom Bluetooth, jeśli nie jest włączone
3. Połącz się z urządzeniem
4. Wróć do aplikacji



Szczegóły znajdziesz w instrukcji telefonu i tutaj:

<https://support.google.com/androidanswer/9075925?hl=pl>

<https://support.apple.com/pl-pl/HT204091>

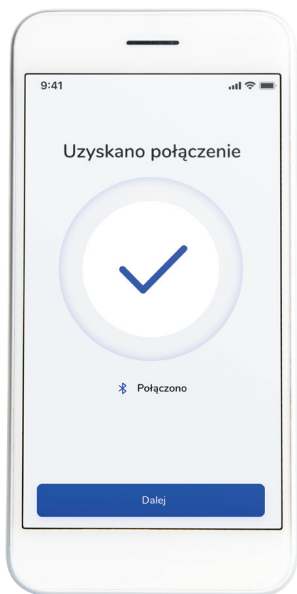


**Jak tylko
połączysz
telefon
z urządzeniem,
w aplikacji
zobaczysz
ekran
z informacją
o powodzeniu
tej akcji.**

Wykonywanie pomiarów

Gdy zalogujesz się i połączysz telefon z pulsoksymetrem przez Bluetooth, aplikacja jest gotowa do pracy.

**Aby wykonać pomiar,
wciśnij START.**

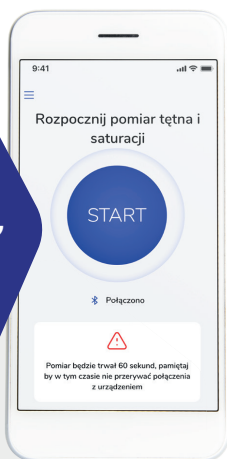

W kolejnym kroku aplikacja poinformuje Cię, jak wykonać pomiar.



Szczegółowe informacje jak przeprowadzić pomiar, znajdziesz w instrukcji pulsoksymetru.




Rozpoczęcie pomiaru zasygnalizuje komunikat w aplikacji.

Dodatkowo na ekranie zobaczysz, ile czasu pozostało do zakończenia pomiaru.

Po zakończonym pomiarze zobaczysz wyniki w aplikacji.

Aplikacja poprosi Cię o dodatkowe dane.

Pomiary możesz wykonać urządzeniami innymi niż pulsoksymetr.

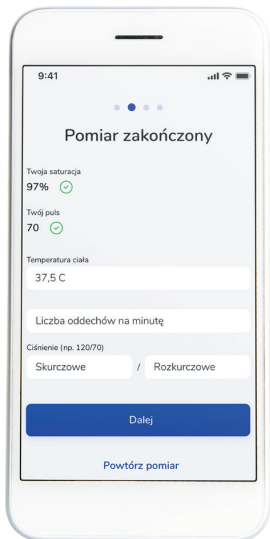


Aplikacja poprosi Cię również o dane uzupełniające do wywiadu medycznego.
Zakres danych może być różny, w zależności o decyzji lekarza.

Ostatni etap pomiaru to podsumowanie wszystkich danych pobranych z pulsoksymetru oraz danych wprowadzonych przez Ciebie do aplikacji.

Na tym etapie możesz wysłać wyniki lub powtórzyć pomiar jeżeli okaże się, że któraś z danych jest błędna.

Pamiętaj, aby telefon miał połączenie z internetem przez sieć komórkową lub wifi podczas wysyłania wyników.

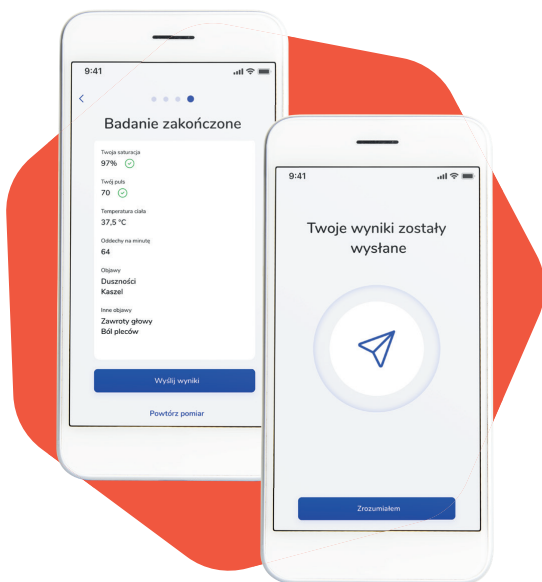

Po wysłaniu wyników zobaczysz komunikat z potwierdzeniem.

Kiedy klikniesz ZROZUMIAŁEM, wrócisz na ekran początkowy i możesz wykonać kolejny pomiar.