

Informacja dla klientów dostarczających wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji do laboratorium

- Klient zakłada testy w urządzeniu sterylizującym zgodnie z instrukcją producenta.
- Po skończonym cyklu sterylizacyjnym powinien dostarczyć je w czasie 2h do laboratorium uważając, aby nie uległy naruszeniu i uszkodzeniu.
- Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia wskaźników w podanym czasie przechowywać w temp. lodówki od +2 do +8 °C do 24 godzin.
- Do badanych próbek należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji tej samej serii co badane testy.